


## Anleitung

Schnüze dir **mindestens 2 mal die Nase** und wasche dir danach gründlich die Hände.


Stelle das Probenröhrchen  in den Röhrchenständer auf der Verpackung.

1.




- Öffne die Flasche mit der Flüssigkeit und gebe sie in das Probenröhrchen.

2.

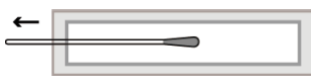


- Zieh den Tupfer vorsichtig aus der Packung und **berühre nicht die Spitze**. Hebe die Verpackung auf.

3.

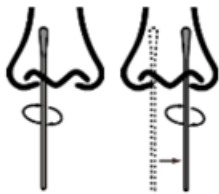


- Führe den Tupfer in den vorderen Nasenbereich (ca. 2,5 cm) ein und drehe ihn **mindestens 10 Sekunden lang** an der Naseninnenwand.
- Wiederhole dies mit dem anderen Nasenloch.

4.

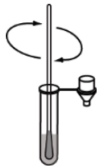


- Nimm das Probenröhrchen in die Hand und drehe den Tupfer 20 Sekunden lang an der Wand des Röhrchens.

5.

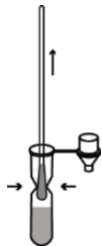


- Drücke das Probenröhrchen mit den Fingern zusammen und ziehe den Tupfer nach oben. **Entferne dabei so gut wie möglich die Lösung vom Tupfer**.
- Stecke den Tupfer danach in seine Verpackung und schließe das Probenröhrchen mit dem Verschluss.

6.

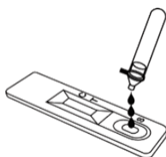

- Entnimm die Testkarte der Verpackung.
- Achte darauf, dass die Testkarte flach liegt und bis zum Testende nicht mehr bewegt wird.
- Gib **3 Tropfen** aus dem Probenröhrchen auf die runde Vertiefung mit der **Beschriftung S**.

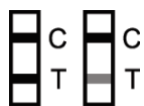

Positiv



Negativ



Ungültig